

HARMONY

INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'ENTRETIEN DE LA BARRE D'APPUI

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'INSTALLATION

ATTENTION: Le non-respect de ces instructions avant l'installation peut entraîner des blessures corporelles, des dommages matériels ou une défaillance du produit. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de défaillance du produit due à une installation incorrecte.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE L'INSERT DE CARRELAGE

1. Retirez la barre d'appui de l'emballage et placez-la sur une surface de travail propre, plane et stable.
2. Essuyez la base de la cavité de la barre avec du diluant pour laque pour éliminer les contaminants.
3. Coupez un rectangle de votre carreau de 1" de large sur la longueur de la cavité de la barre. La cavité de l'insert peut accueillir des carreaux jusqu'à 3/8" d'épaisseur. (Notez que plusieurs morceaux de carreaux peuvent être nécessaires pour couvrir toute la longueur.)
4. Effectuez un test à sec en plaçant votre insert de carreau dans la cavité de la barre d'appui pour assurer un ajustement serré sur les quatre côtés. L'adhésif absorbera les variations de hauteur.
5. Posez le carreau face vers le bas sur une surface de travail propre et plane.
6. Appliquez un cordon de 1/4" au centre du canal (un peu plus si votre insert est fin) d'un adhésif de construction étanche qui lie l'acier inoxydable à la céramique, à la porcelaine et au verre le long de la longueur de votre insert de carreau.

ATTENTION : Évitez que l'adhésif ne touche les surfaces finies de la barre car des dommages peuvent survenir.

7. Placez délicatement votre insert de carreau avec l'adhésif dans la cavité de la barre d'appui. Il devrait y avoir suffisamment d'adhésif pour que l'insert dépasse légèrement du bord supérieur de la barre d'appui.
8. Utilisez une planche plate d'au moins 2" de large pour presser l'insert de carreau en place. La planche doit toucher les deux côtés longs de la barre d'appui, assurant une finition affleurante.
9. Retirez la planche en bois et vérifiez s'il y a de l'adhésif qui a pu sortir. Nettoyez soigneusement tout excès visible d'adhésif pour maintenir une apparence soignée.
10. Retournez l'ensemble de la barre d'appui et de l'insert de carreau à l'envers sur une surface plane. Laissez-le tout durcir selon les instructions du fabricant. Cette étape finale garantit que les surfaces supérieures de la barre d'appui et de l'insert de carreau sont affleurantes.

AVERTISSEMENT :

LA BARRE D'APPUI PEUT NE PAS FOURNIR LE SUPPORT CONÇU À MOINS QUE CES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION NE SOIENT STRICTEMENT SUIVIES.

Pour une installation correcte, les deux extrémités de la barre d'appui DOIVENT être positionnées sur un montant de mur. Pour un support solide, au moins 2 des 3 vis aux extrémités de la barre d'appui DOIVENT traverser le panneau mural ou le carreau et être solidement fixées dans le montant de mur. Si des montants de mur ne sont pas disponibles, des blocs de bois ou des ancrures murales conformes à l'ADA peuvent être utilisés.

La barre d'appui peut être installée verticalement, horizontalement ou en angle. Localisez les montants de mur derrière le mur avant de commencer l'installation.

LES ÉTAPES SUIVANTES NÉCESSITENT DE PERCER LE MUR. Lors du perçage du mur, faites attention à éviter tout câblage électrique ou plomberie qui pourrait être situé derrière le mur. Les fils électriques endommagés peuvent provoquer des chocs électriques et/ou des incendies. Étant donné que les maisons anciennes ne respectent pas toujours les codes et exigences actuels en matière de logement, sachez où se trouvent les fils internes du mur afin qu'aucun fil n'interfère avec votre installation. UNE INSTALLATION CORRECTE EST EXTRÊMEMENT IMPORTANTE. EN CAS DE DOUTE, L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN PROFESSIONNEL QUALIFIÉ.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE LA BARRE D'APPUI

1. Déterminez l'emplacement et l'orientation souhaités de l'installation. Pour les installations montées sur montant, utilisez un détecteur de montant pour vérifier les emplacements des montants.
2. Tirez doucement les rosaces des brides de montage pour exposer les trous de vis.
3. Placez le produit contre le mur à l'emplacement souhaité. Si vous montez le produit verticalement ou horizontalement, utilisez un niveau pour vérifier que le produit est correctement orienté.
4. Utilisez un crayon pour marquer l'emplacement des trous de vis sur le mur. REMARQUE : Avant d'installer la barre d'appui à l'emplacement marqué, déterminez s'il existe des obstructions de plomberie, électriques ou autres derrière le mur.
5. Utilisez un foret de 1/8" pour percer des trous pilotes dans le mur et les montants de mur au centre des positions de trous de vis marquées. REMARQUE : Si vous installez la barre d'appui sur des carreaux de céramique, utilisez un foret à pointe en carbure de 1/4" ou une scie cloche diamantée pour percer à travers le carreau afin d'éviter d'endommager le carreau. Ensuite, utilisez un foret de 1/8" pour percer des trous pilotes dans le montant de mur lui-même.
6. Utilisez un mastic silicone approprié pour les applications humides, appliquez du mastic dans les trous percés et sur les surfaces des brides de montage qui se fixent au mur.
7. Placez l'ensemble de la barre d'appui contre le mur et alignez les trous de vis dans la bride de montage avec les trous pilotes dans le mur. Insérez les vis fournies dans les trous et serrez chaque vis à la main dans le mur et le montant de mur. Une fois la barre d'appui correctement orientée, utilisez un tournevis pour serrer fermement toutes les vis.
8. Pour dissimuler les vis de montage, faites glisser les rosaces sur les brides de montage et appuyez fermement contre le mur.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION DE LA BARRE D'APPUI

Des soins doivent être apportés au nettoyage de ce produit. Bien que sa finition soit extrêmement durable, elle peut être endommagée par des abrasifs ou des produits de polissage agressifs. Pour nettoyer, essayez simplement avec un chiffon humide et séchez avec une serviette douce. N'utilisez pas de nettoyeurs métalliques, commerciaux (eau de Javel, ammoniac ou acide) ou abrasifs de quelque nature que ce soit. Utilisez une extrême prudence sur les surfaces de baignoire ou de sol mouillées. Les utilisateurs ayant des capacités physiques limitées doivent être supervisés ou assistés dans les zones de bain et de toilettes, même lorsqu'ils utilisent des barres d'appui. Assurez-vous que les barres d'appui sont correctement et solidement installées. N'utilisez JAMAIS les barres d'appui si une quelconque instabilité est constatée. Après TOUT ajustement, réparation ou service et AVANT utilisation, assurez-vous que tout le matériel de fixation est bien serré.

GARANTIE

Ce produit est couvert par la garantie LifeValet Consommateur. (Durée de vie avec limitation pour les installations résidentielles et 2 ans pour les installations commerciales) Les conditions complètes de la garantie peuvent être trouvées sur lifevalet.com/terms. Pour une copie papier des conditions de garantie, contactez le service à la clientèle LifeValet.

lifevaletTM

Corona, CA 92883

Questions, problèmes, pièces manquantes ? Avant de retourner au magasin, appelez le service à la clientèle Life Valet au (951) 817-5600 8h-17h, PST du lundi au vendredi
www.lifevalet.com



BARRE D'APPUI CONFORME À L'ADA
LORSQU'ELLE EST INSTALLÉE SELON LES
LIGNES DIRECTRICES D'ACCESSIBILITÉ
ET LA LOI.



English



en Español