

# HARMONY

## INSTRUCCIONES DE INSTALACION & MANTENIMIENTO

**Gracias!** Agradecemos la confianza que ha depositado en nosotros al adquirir su nueva barra de apoyo Harmony. Siguiendo estas instrucciones de instalación y cuidado, usted disfrutará de una vida llena de "seguridad con estilo".

### **LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE LA INSTALACION**

**ADVERTENCIA:** El no leer estas instrucciones de instalación puede resultar en lesiones personales, daños a la propiedad, o falla en el funcionamiento del producto. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por la falla del producto debido a una instalación incorrecta.

### **ANTES DE LA INSTALACION**

#### **Incluido en el paquete:**

- Barra de apoyo (1)
- Tornillos de montaje, #10 x 2-1/2" de acero inoxidable (3 piezas por cada extremo de fijación)

#### **Herramientas necesarias para la instalación:**

- Lentes de Seguridad
- Detector de montantes
- Nivel
- Lápiz u otro marcador
- Taladro eléctrico y brocas (ver tamaños requeridos mas abajo)
- Sellador de Silicón
- Desarmador Philips #2

### **ADVERTENCIA:**

LA BARRA DE APOYO PUEDE NO PROPORCIONAR EL NIVEL DE SOPORTE DISEÑADO A MENOS QUE ESTAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN SE SIGAN ESTRICTAMENTE. Para una instalación adecuada, ambos extremos de la barra de apoyo DEBEN estar posicionados sobre un montante de pared. Para un soporte sólido, al menos 2 de los 3 tornillos en cada extremo de la barra DEBEN atravesar el panel de yeso o loseta y estar firmemente asegurados en el montante de pared. Si no hay montantes disponibles, se puede usar un refuerzo de madera o anclajes para muro que cumplan con la norma ADA. La barra de apoyo puede instalarse en posición vertical, horizontal o en ángulo. Ubique los montantes de la pared antes de comenzar la instalación. LOS SIGUIENTES PASOS REQUIEREN PERFORAR LA PARED. Al perforar, tenga cuidado de no dañar cableado eléctrico o tuberías que puedan estar detrás del muro. Un cable eléctrico dañado puede provocar descarga eléctrica y/o incendio. Dado que las viviendas antiguas no siempre cumplen con los códigos de construcción actuales, es importante saber dónde se encuentra el cableado interno para evitar interferencias durante la instalación. LA INSTALACIÓN ADECUADA ES EXTREMADAMENTE IMPORTANTE. EN CASO DE DUDA, LA INSTALACIÓN DEBE SER REALIZADA POR UN PROFESIONAL CALIFICADO.

## **INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE LA BARRA DE APOYO**

1. Determine la ubicación y orientación deseadas para la instalación. Para instalaciones montadas sobre montantes, utilice un buscador de montantes para verificar su ubicación.

2. Tira suavemente de los cubre tornillos para separarlos de las bridas de montaje y dejar visibles los orificios para los tornillos.

3. Coloca el producto contra la pared en la ubicación deseada. Si vas a instalar la barra en posición vertical u horizontal, usa un nivel para asegurarte de que esté correctamente alineada.

4. Use un lápiz para marcar en la pared la ubicación de los orificios para los tornillos.

NOTA: Antes de instalar la barra en la ubicación marcada, verifique si hay plomería, cableado eléctrico u otras obstrucciones detrás del muro.

5. Use una broca de 1/8" para perforar orificios guía en la pared y en los montantes, centrados en las marcas realizadas.

NOTA: Si vas a instalar la barra sobre azulejo cerámico, utiliza una broca con punta de carburo de 1/4" (6 mm) o una corona con punta de diamante para perforar el azulejo sin dañarlo. Luego, usa una broca de 1/8" para perforar el montante detrás del azulejo

6. Usando un sellador de silicón adecuado para aplicaciones húmedas, aplica sellador dentro de los orificios perforados y sobre las superficies de las bridas de montaje que estarán en contacto con la pared.

7. Coloca la barra de apoyo contra la pared y alinea los orificios de la brida de montaje con los orificios guía. Inserta los tornillos provistos en los orificios y apriétalos a mano en la pared y en el montante. Una vez que la barra esté correctamente orientada, utiliza un destornillador para apretar firmemente todos los tornillos.

8. Para ocultar los tornillos de montaje, desliza los cubre tornillos sobre las bridas y presiónalos firmemente contra la pared

## **INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y USO DE LA BARRA DE APOYO**

Debe prestarse atención al limpiar este producto. Aunque su acabado es extremadamente duradero, puede dañarse con limpiadores abrasivos o pulidores agresivos. Para limpiar, simplemente limpia suavemente con un paño húmedo y seca con una toalla suave. No uses limpiadores metálicos, comerciales (lejía, amoníaco o ácido), ni limpiadores abrasivos de ningún tipo.

Usa EXTREMA precaución en superficies mojadas de la tina o del piso.

Los usuarios con capacidades físicas limitadas deben ser supervisados o asistidos en áreas de baño y sanitario, incluso cuando usen barras de apoyo.

Asegúrate de que las barras de apoyo estén correctamente y firmemente instaladas. NUNCA uses las barras de apoyo si se nota algún movimiento o aflojamiento. Después de CUALQUIER ajuste, reparación o servicio y ANTES de su uso, asegúrate de que todos los herrajes de sujeción esté firmemente apretado.

## **GARANTÍA**

This product is covered under the LifeValet Consumer Warranty. (Limited Lifetime for Residential, and 2 years for Commercial installations) Full warranty terms can be found at [lifevalet.com/terms](http://lifevalet.com/terms).

For a hard copy of warranty terms, contact LifeValet Customer Service.

**lifevalet**<sup>™</sup>

Corona, CA 92883

Antes de regresar el producto a la tienda, llama al Servicio al Cliente de Life Valet al (951) 817-5600 de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m., hora del Pacífico (PST) [www.lifevalet.com](http://www.lifevalet.com)



### **BARRA DE APOYO CUMPLE CON ADA**

Cuando se instala conforme a las pautas de accesibilidad establecidas por la Ley ADA



**English**



**en Français**