

Merci! Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez témoignée par l'achat de votre nouvelle barre d'appui Harmony. En suivant ces instructions d'installation et d'entretien, vous profiterez d'une vie entière de « sécurité avec style ».

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'INSTALLATION

ATTENTION : Le fait de ne pas lire ces instructions avant l'installation peut entraîner des blessures corporelles, des dommages matériels ou une défaillance du produit. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de défaillance due à une installation incorrecte.

AVANT L'INSTALLATION

Contenu de l'emballage:

- Barre d'appui (1)
- Vis de montage en acier inoxydable #10 x 2-1/2 po (3 par pied)

Outils requis pour l'installation

- Lunettes de sécurité
- Détecteur de montants
- Niveau
- Crayon ou autre marqueur
- Perceuse électrique et mèches (voir les tailles ci-dessous)
- Scellant au silicone
- Tournevis cruciforme #2

AVERTISSEMENT:

LA BARRE D'APPUI NE FOURNIRA PAS LE NIVEAU DE SOUTIEN CONÇU À MOINS QUE CES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION NE SOIENT STRICTEMENT SUIVIES . Pour une installation adéquate, les deux extrémités de la barre d'appui DOIVENT être positionnées sur un montant mural. Pour un soutien solide, au moins 2 des 3 vis à chaque extrémité de la barre d'appui DOIVENT traverser le mur ou le carrelage et être solidement fixées dans le montant. Si aucun montant n'est disponible, des blocs de bois ou des ancrages muraux conformes aux normes ADA doivent être utilisés. La barre d'appui peut être installée verticalement, horizontalement ou en biais. Localisez le(s) montant(s) mural(s) derrière le mur avant de commencer l'installation.

LES ÉTAPES SUIVANTES NÉCESSITENT DE PERCER LE MUR. Lorsque vous percez, faites attention à tout câblage électrique ou plomberie derrière le mur. Des fils électriques endommagés peuvent entraîner un choc électrique et/ou un incendie. Comme les anciennes maisons ne sont pas toujours conformes aux normes actuelles, assurez-vous de connaître l'emplacement des fils dans le mur afin d'éviter toute interférence. UNE INSTALLATION ADÉQUATE EST ESSENTIELLE. EN CAS DE DOUTE, FAIRE APPEL À UN PROFESSIONNEL QUALIFIÉ.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE LA BARRE D'APPUI

1. Déterminez l'emplacement et l'orientation souhaités. Pour une installation sur montant, utilisez un détecteur pour localiser les montants.
2. Tirez doucement les rosaces pour dégager les brides de fixation.
3. Placez le produit contre le mur à l'endroit souhaité. Si la barre est installée verticalement ou horizontalement, utilisez un niveau pour vérifier son alignement.
4. Utilisez un crayon pour marquer l'emplacement des trous de vis sur le mur.
REMARQUE : Avant d'installer, vérifiez s'il y a de la plomberie, de l'électricité ou d'autres obstructions derrière le mur.
5. Utilisez une mèche de 1/8 po pour percer les trous pilotes au centre des marques, dans le mur et le montant. REMARQUE : Pour l'installation sur un carrelage, percez d'abord avec une mèche au carbure de 1/4 po ou une scie cloche diamantée, puis percez les trous pilotes dans le montant avec une mèche de 1/8 po.
6. Appliquez un scellant au silicone adapté aux environnements humides dans les trous percés et sur les surfaces des brides de fixation.
7. Placez la barre contre le mur et alignez les trous. Insérez les vis fournies et vissez-les à la main. Une fois bien positionnée, serrez les vis avec un tournevis.
8. Pour dissimuler les vis, glissez les rosaces sur les brides et appuyez fermement contre le mur.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION DE LA BARRE D'APPUI

Ce produit doit être nettoyé avec soin. Bien que sa finition soit très résistante, elle peut être endommagée par des produits abrasifs ou des polissifs agressifs. Nettoyez avec un chiffon humide et séchez avec une serviette douce. N'utilisez aucun produit métallique, abrasif ou commercial (eau de Javel, ammoniac, acide).

Soyez TRÈS prudent sur les surfaces mouillées.

Les personnes ayant des capacités physiques limitées doivent être surveillées ou assistées dans les zones de bain, même en présence de barres d'appui.

Assurez-vous que les barres sont correctement installées. NE JAMAIS utiliser une barre desserrée.

Après tout ajustement, réparation ou entretien, et AVANT l'utilisation, assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées.

GARANTIE

Ce produit est couvert par la garantie consommateur LifeValet (à vie pour les installations résidentielles, et 2 ans pour les installations commerciales). Les conditions complètes de garantie sont disponibles à l'adresse : lifevalet.com/terms. Pour une copie papier des conditions de garantie, communiquez avec le service à la clientèle de LifeValet.

**life
valet**

Corona, CA 92883

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes ? Avant de retourner l'appareil en magasin, veuillez appeler le service client LifeValet au (951) 817-5600 Du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h (heure du Pacifique) www.lifevalet.com



BARRE D'APPUI CONFORME À
L'ADA LORSQU'ELLE EST INSTALLÉE
CONFORMÉMENT AUX DIRECTIVES
D'ACCESSIBILITÉ DE LA LOI.



en Español



English