



VIBE AVEC VERRE

BARRES D'APPUI DESIGNER

Pour un usage résidentiel et commercial

DIRECTIVES D'INSTALLATION



Lisez attentivement ce manuel avant l'installation.

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS DE SÉCURITÉ

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'INSTALLER
LE SYSTÈME DE BARRE D'APPUI

Définitions

AVERTISSEMENT Peut causer des blessures graves ou la mort

ATTENTION Peut causer des dommages matériels

Pour plus d'informations sur les directives
d'installation de LifeValet, voir : www.lifevalet.com

Lors de l'installation et de l'utilisation de ce système de barre d'appui, les précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées, notamment:

AVERTISSEMENT: Ne montez pas sur des surfaces de murs creux comme le gypse, le placoplâtre, le plâtre, la fibre de verre, l'acrylique ou des matériaux similaires sans support solide. Ne fixez pas les barres d'appui directement sur des montants creux en acier. Pour supporter la limite maximale de poids, les barres d'appui doivent être fixées à des blocs solides installés entre les montants du mur ou aux montants eux-mêmes.

AVERTISSEMENT: Utilisez la quincaillerie et les vis de fixation incluses avec le produit. Si un système d'ancrage à paroi creuse est utilisé, il doit être certifié par son fabricant comme conforme à l'ADA, pour une utilisation avec des barres d'appui et compatible avec le profil mural de Vibe.

AVERTISSEMENT: Ne modifiez pas le produit de quelque façon que ce soit. La modification du produit annulera toutes les certifications et garanties du produit.

AVERTISSEMENT: Faites attention à ne pas pénétrer dans les tuyaux ou lignes électriques existants lorsque vous vissez dans un mur. Des dommages, blessures ou décès peuvent survenir.

ENREGISTRER CE GUIDE D'INSTALLATION

VIBE AVEC VERRE

BARRES D'APPUI DESIGNER

DIRECTIVES D'INSTALLATION

TABLE DES MATIÈRES

Outils nécessaires à l'installation	P.4
Fiche d'exercices sur la liste des pièces	P.5
Préparation du site	P.6
Aperçu de l'installation	P.7
Préparation derrière le mur	P.8
Déballer	P.9
Installation préliminaire	P.10
Installation des plaques de montage	P.13
Installation de la position finale de la barre d'appui	P.14
Assemblage de plusieurs barres et options	P.15
Instructions d'entretien et d'utilisation	P.16

Félicitations pour l'achat de la barre d'appui Vibe de LifeValet!

REMARQUE: Ce guide d'installation concerne uniquement le système barre d'appui Vibe de LifeValet. Pour l'installation de autres modèles de barre d'appui LifeValet, veuillez visiter www.lifevalet.com ou contacter votre représentant des ventes.


FIGURE 1: OUTILS NÉCESSAIRES À L'INSTALLATION



Marqueur
permanent à
pointe fine



Mèches
diamantées

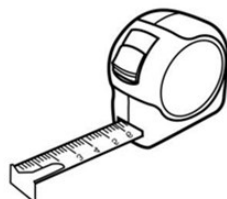


Ruban à mesurer



Adhésif de
construction
imperméable &
pistolet



Niveau

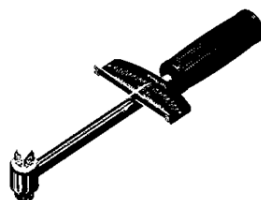

Clé
dynamométrique
Capable de lire 14
po. (1,58 N-m)



Scie à gypse



Détecteur de
montants

VIBE AVEC VERRE


BARRES D'APPUI DESIGNER

DIRECTIVES D'INSTALLATION

FIGURE 2: LISTE DES PIÈCES

Voici une liste des pièces pour le système de barre d'appui Vibe.

POINT	DESCRIPTION
1	Sous-ensemble de la barre principale Vibe avec insert en verre
2	Connecteurs (2) (droits, à 120 degrés ou à 90 degrés)
3	Capuchon d'extrémité - A
4	Capuchon d'extrémité - B
5	Extensions murales (2)
6	Plaques de montage (2)
7	Vis à tête plate SS 5/16 »-24 x 1 » Phillips (2)
8	Vis de plaque de montage, 21/64 x 2" (6)
9	(Non utilisé)
10	Inserts de connecteur bombé (2)

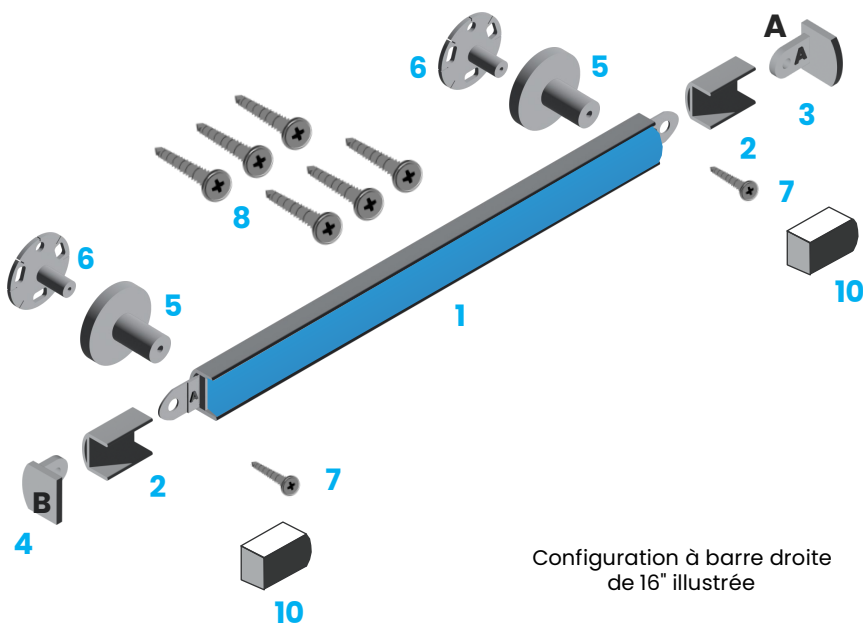


PRÉPARATION DU SITE

LifeValet recommande une installation par un professionnel qualifié en utilisant les pratiques d'installation ADA actuelles pour les barres d'appui telles que détaillées par l'ANSI 117.1 et/ou l'ASTM F446-19. R23.


Les barres d'appui VIBE doivent être montées directement sur des montants muraux ou un blocage solide approprié entre les montants et fixées à l'aide d'au minimum deux vis par plaque de montage.

Si un système d'ancrage à paroi creuse est utilisé, il doit être certifié par son fabricant comme conforme à l'ADA pour une utilisation avec des barres d'appui et compatible avec le profil mural de Vibe. Suivez les instructions d'installation fournies par le fabricant du produit.

OPTION DE BLOCAGE SOLIDE:

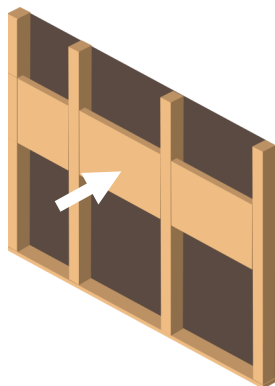

OPTION DE MONTANTS MURAUX :

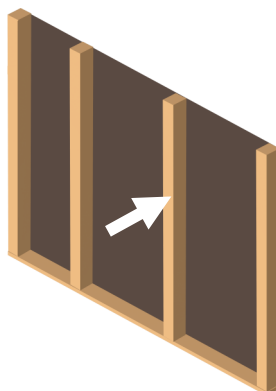

Note: Vérifiez que tous les ensembles de barres d'appui, connecteurs et/ou composants nécessaires sont à portée de main pour assurer une installation correcte. Veuillez contacter votre représentant des ventes ou le service à la clientèle (sales@lifevalet.com ou 833.543.8253) chez LifeValet pour obtenir de l'aide.

VIBE AVEC VERRE

BARRES D'APPUI DESIGNER

DIRECTIVES D'INSTALLATION

DAPERÇU DE L'INSTALLATION

1. Préparation derrière le mur, installation du blocage
2. Déballer la barre d'appui
3. Préparer la barre principale pour l'installation (voir page 9)
4. Installation préliminaire, marquez la position murale des plaques de fixation
5. Installation de la barre d'appui sur les plaques de fixation
6. Finaliser l'installation de votre barre d'appui



PRÉPARATION DERRIERE LE MUR

Les barres d'appui VIBE doivent être vissées dans des blocages installés entre les montants ou directement sur les montants. Cette préparation du mur est effectuée avant que le mur fini et le placage final soient en place. Assurez-vous que tous les blocages soient bien en place et bien positionnés avant d'installer des barres d'appui.

Si un système d'ancrage à paroi creuse est utilisé, il doit être certifié par son fabricant comme conforme à l'ADA pour une utilisation avec des barres d'appui et compatible avec le profil mural de Vibe. Suivez les instructions d'installation fournies par le fabricant du produit.

Quel que soit le type d'installation, LifeValet recommande une installation par un professionnel qualifié en utilisant les pratiques d'installation ADA actuelles pour les barres d'appui telles que détaillées par ANSI 117.1 et/ou ASTM F446-19. R23.

Pour les installations ADA, où la longueur des barres d'appui est inférieure à 18", l'emplacement de l'installation sera selon les normes ADA.

Pour les informations les plus récentes, veuillez-vous référer au Code local du bâtiment dans votre région ainsi qu'à la copie la plus récente des normes suivantes :

- ASTM F446-19 intitulée « Spécification standard de sécurité grand public pour les barres d'appui et accessoires installés dans la zone de bain »
- ANSI A117.1-2017, ICC A117.1-17, intitulée « Norme pour les bâtiments et installations accessibles et utilisables »

VIBE AVEC VERRE

BARRES D'APPUI DESIGNER

DIRECTIVES D'INSTALLATION

DÉBALLAGE

Déballiez la barre d'appui et les composants de la boîte sur une surface souple et non abrasive et disposez toutes les pièces comme présenté à la page 5, Figure 2 : Liste des pièces. Vérifiez que tous les composants sont présents et n'ont pas été endommagés lors du transport. Tout au long de l'installation, consultez la Figure 2 : Liste des pièces à la page 5 pour identifier facilement les composants.

INSTALLATION PRÉLIMINAIRE

Note: Le capuchon d'extrémité « B » se connecte au côté « A » de la barre principale.


Retirez les inserts de connecteur (10) et mettez-les de côté.

Assemblage à l'extrémité gauche

1. Placez la barre principale de façon que la cavité vide vous fasse face.


2. Localiser les parties 4, 2 et 1. Alignez-les comme indiqué. Chaque capuchon d'extrémité est marqué soit « A » soit « B ». Assurez-vous que le capuchon d'extrémité gauche, partie 4, est marqué comme « B ». Les connecteurs sont universels, donc interchangeables.

3. Relier le connecteur (2) à la barre principale (1) à l'extrémité « A ». Ensuite, insérez le capuchon d'extrémité « B » (4) dans le connecteur d'insertion (2).

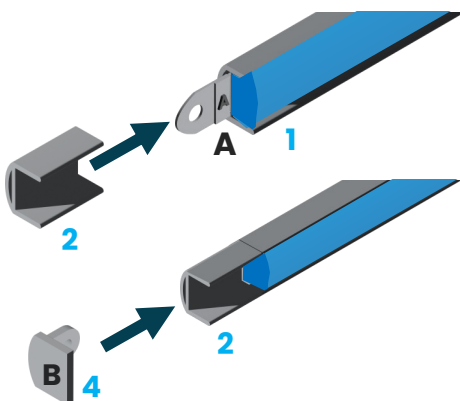


INSTALLATION PRÉLIMINAIRE

4. Dans le cadre du processus d'installation préliminaire, utilisez la vis (7) pour fixer l'ensemble de la barre principale à la plaque de fixation (6) — et non à l'extension murale (5). Cette étape préliminaire est nécessaire. Assurez-vous que la flèche vers le bas sur la plaque de montage est orientée vers le bas.

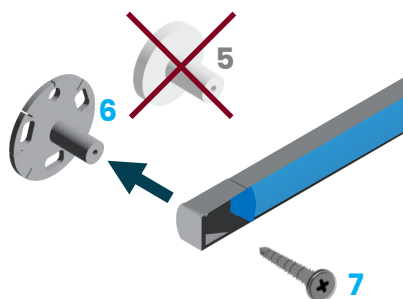

Assemblage à l'extrémité droite

5. Répétez les étapes de l'assemblage à l'extrémité gauche pour l'ensemble à l'extrémité droite. Reliez le connecteur (2) à la barre principale (1) à l'extrémité « B ». Ensuite, insérez le capuchon d'extrémité « A » (3) dans le connecteur d'insertion (2).

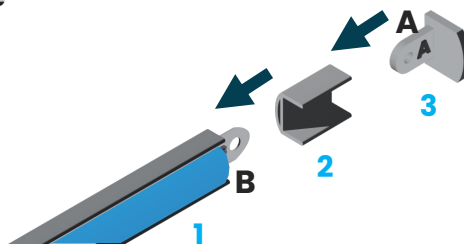

VIBE AVEC VERRE

BARRES D'APPUI DESIGNER

DIRECTIVES D'INSTALLATION

6. La barre principale est maintenant vissée aux deux plaques de montage et prête pour l'étape suivante.


Positionnement de la plaque de montage:

a) Positionner la barre d'appui à l'endroit désiré sur le mur, en s'assurant que les plaques de fixation sont affleurantes à la surface et alignées avec les montants ou le blocage solide dans le mur.

b) Utiliser un niveau pour confirmer que la barre d'appui est bien nivelée ou alignée à l'angle désiré.

c) Avec un marqueur permanent à pointe fine, marquez les positions des trous de vis sur chaque plaque de montage. Assurez-vous que la flèche « Vers le bas » est orientée vers le bas.

d) Chaque plaque de montage doit être installée avec un minimum de deux vis.

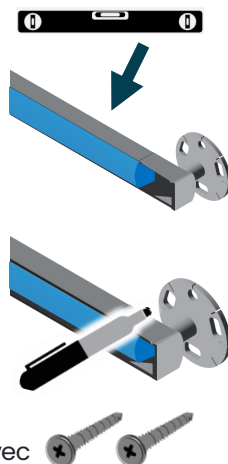

INSTALLATION PRÉLIMINAIRE (SUITE)

8. **Lorsque vous percez des carreaux de porcelaine, consultez le fabricant du carrelage pour obtenir ses recommandations.**

a) LifeValet recommande de commencer par percer un trou pilote peu profond pour assurer un contrôle précis à l'étape suivante.

b) Garder la zone de perceuse humide pendant le processus en utilisant une éponge humide ou en pulvérisant de l'eau avec un vaporisateur pour refroidir le foret et réduire la poussière.

c) Utiliser un foret de 1/4 » conçu spécifiquement pour le « verre et carrelage ».

d) La maçonnerie standard ou les mèches à embout en carbure peuvent ne pas être efficaces pour cette tâche. Utilisez des forets « verre et carrelage », comme ceux de Milwaukee ou des bandes comparables, facilement disponibles dans la plupart des quincailleries.

e) Après avoir créé le trou pilote, utilisez une scie-cloche à micro-cloche diamantée de 1/4", comme celles de Milwaukee ou de marques similaires, pour percer complètement à travers la tuile.

f) Suivez toujours les instructions du fabricant pour leurs produits.

g) Référez-vous aux marques que vous avez faites précédemment pour les plaques de fixation, et percez chaque trou selon ces directives.



VIBE AVEC VERRE


BARRES D'APPUI DESIGNER

DIRECTIVES D'INSTALLATION


INSTALLATION DES PLAQUES DE MONTAGE

Installation dans un blocage solide : Utilisez ces étapes pour fixer des barres d'appui sur des blocs solides préfabriqués à l'intérieur du mur. Pour les instructions de montage avec des chevilles murales spécialement désignées, suivez les instructions d'installation du fabricant.

9. Avec tous les trous percés et prêts à recevoir la barre d'appui, fixez les plaques de fixation au mur aux emplacements prévus à l'aide de vis (8). Si la barre principale bloque l'emplacement des vis, les vis peuvent être laissées dehors jusqu'à l'étape 11.

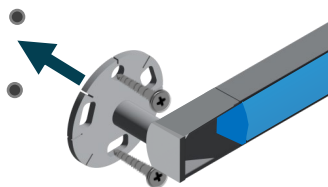


10. Retirez les vis gauche et droite (7) qui fixent l'ensemble principal de la barre aux plaques de fixation murale.

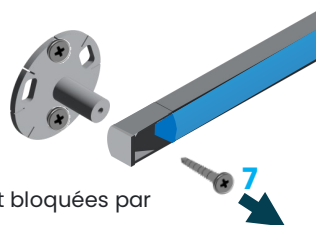

11. Installer toutes les vis (8) qui étaient auparavant bloquées par l'ensemble principal de la barre.

12. Positionnez l'extension murale (5) sur l'axe fileté de la plaque de montage et vissez soigneusement dans le sens horaire jusqu'à ce que l'extension murale soit bien serrée et bien serrée contre le mur. Répétez pour le(s) Montage Muraux(s) restant(s).

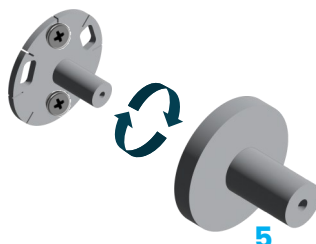


ATTENTION: N'utilisez pas d'outils pour serrer l'extension murale. Ce n'est pas nécessaire, et des dommages peuvent survenir.

INSTALLATION DE LA BARRE D'APPUI EN POSITION FINALE


Placez la barre d'appui assemblée sur les rallonges murales et réutiliser les vis (7), serrez jusqu'à ce que ce soit bien serré. Utilisez une clé dynamométrique pour serrer à 14 pouces ou 1,58 N-m.

Testez l'intégrité de votre installation en appliquant graduellement une pression vers le bas au centre de la barre. Il ne devrait y avoir aucun mouvement. La barre d'appui Vibe est conçue pour résister à un minimum de 300 lb de force vers le bas.

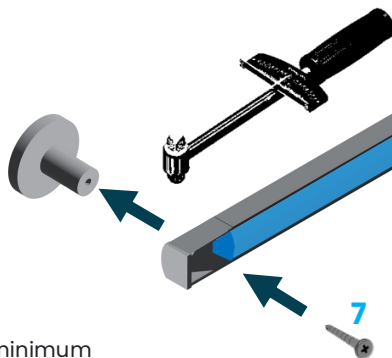

INSTALLATION DES INSERTS DE CONNECTEUR

Passez un léger filet d'adhésif à la base de la cavité (2) de chaque connecteur. Placez un insert de connecteur bombé (10) dans le connecteur (2) et appuyez jusqu'à ce qu'il s'ajuste en position. Le dessus de l'insert de connecteur doit être aligné et affleurant avec le haut de l'insert en verre de la barre d'appui. Répétez pour les autres inserts de connecteur.

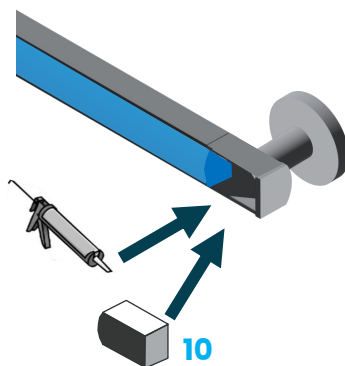

Félicitations! Vous avez installé avec succès votre barre d'appui Vibe.

VIBE AVEC VERRE


BARRES D'APPUI DESIGNER

DIRECTIVES D'INSTALLATION


OPTIONS DE CONNECTEURS DE BARRES MULTIPLES

Les barres d'appui Vibe sont modulaires. Cela signifie que vous pouvez utiliser l'un de nos connecteurs d'origine pour assembler des barres en angles de 90 ou 120 degrés. Veuillez parler à votre représentant des ventes ou contacter le service à la clientèle de LifeValet (sales@lifevalet.com ou 833.543.8253) pour plus d'informations.

CONNECTEUR À 120 DEGRÉS

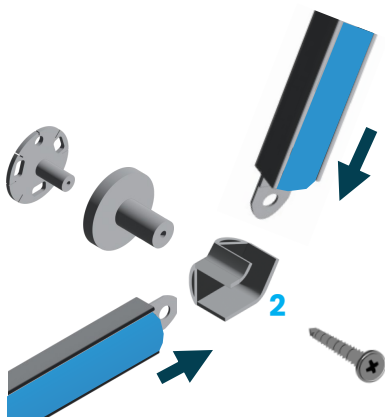

CONNECTEUR À 90 DEGRÉS

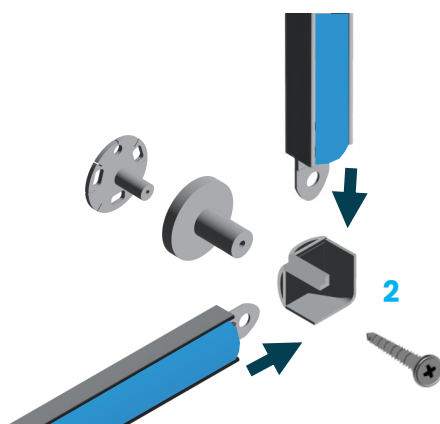

INSTRUCTIONS DE SOINS ET D'UTILISATION

1. Un soin doit être porté au nettoyage de ce produit. Bien que sa finition soit extrêmement durable, elle peut être endommagée par des abrasifs agressifs ou du polissage. Pour nettoyer, il suffit d'essuyer doucement avec un chiffon humide et de sécher avec une serviette douce. N'utilisez pas de nettoyeurs métalliques, commerciaux (eau de Javel, ammoniac ou acide) ou abrasifs de quelque sorte que ce soit.
2. Faites preuve d'une EXTRÊME prudence sur les surfaces humides de la baignoire ou du plancher.
3. Les utilisateurs ayant des capacités physiques limitées devraient être supervisés ou assistés dans les salles de bain et de toilettes, même lorsqu'ils utilisent des barres d'appui.
4. Les barres d'appui doivent être installées correctement et de façon sécuritaire. N'utilisez JAMAIS de barres d'appui si vous remarquez un léger relâchement.



VIBE AVEC VERRE

BARRES D'APPUI DESIGNER

DIRECTIVES D'INSTALLATION



Support produit LifeValet :

Veuillez contacter votre représentant des ventes ou appeler au
(833) 543-8253.

www.lifevalet.com

CONSERVE ESTA GUIA PARA
CONSULTA FUTURA



Elevating INDEPENDENCE

